

Produto

Agulha Hipodérmica de Segurança

Cadastro / Registro M.S.

81840549010

Indicação de Uso

Agulha hipodérmica de segurança, é um artigo médico, classe II, utilizado para a administração de medicamentos e fluidos por via intradérmica-ID, subcutânea-SC, endovenosa-EV e intramuscular-IM, e também, para a coleta de amostras de sangue (arterial ou venoso) ou outros fluidos corporais para análise clínica. Possui **dispositivo de segurança**, cujo objetivo é recobrir e travar a agulha após a injeção, prevenindo o reuso, e acidentes perfuro cortantes; como determina a NR32.

Modelos cadastrados

Nomenclatura Brasileira	TAMANHOS DE AGULHA				
	Diâmetros		Comprimentos		
13 x 12	Cor Padrão - Rosa	18G	1,2mm	1/2"	13mm
16 x 12		18G	1,2mm	5/8"	16mm
20 x 12		18G	1,2mm	3/4"	20mm
25 x 12		18G	1,2mm	1"	25mm
30 x 12		18G	1,2mm	1 1/4"	30mm
40 x 12		18G	1,2mm	1 1/2"	40mm
50 x 12		18G	1,2mm	2"	50mm
13 x 11	Cor Padrão - Bege	19G	1,1mm	1/2"	13mm
16 x 11		19G	1,1mm	5/8"	16mm
20 x 11		19G	1,1mm	3/4"	20mm
25 x 11		19G	1,1mm	1"	25mm
30 x 11		19G	1,1mm	1 1/4"	30mm
40 x 11		19G	1,1mm	1 1/2"	40mm
50 x 11		19G	1,1mm	2"	50mm
13 x 8	Cor Padrão - Verde	21G	0,8mm	1/2"	13mm
16 x 8		21G	0,8mm	5/8"	16mm
20 x 8		21G	0,8mm	3/4"	20mm
25 x 8		21G	0,8mm	1"	25mm
30 x 8		21G	0,8mm	1 1/4"	30mm
40 x 8		21G	0,8mm	1 1/2"	40mm
50 x 8		21G	0,8mm	2"	50mm
13 x 7	Cor Padrão - Preta	22G	0,7mm	1/2"	13mm
16 x 7		22G	0,7mm	5/8"	16mm
20 x 7		22G	0,7mm	3/4"	20mm
25 x 7		22G	0,7mm	1"	25mm
30 x 7		22G	0,7mm	1 1/4"	30mm
40 x 7		22G	0,7mm	1 1/2"	40mm
50 x 7		22G	0,7mm	2"	50mm
13 x 6	Cor Padrão - Azul	23G	0,6mm	1/2"	13mm
16 x 6		23G	0,6mm	5/8"	16mm
20 x 6		23G	0,6mm	3/4"	20mm
25 x 6		23G	0,6mm	1"	25mm
30 x 6		23G	0,6mm	1 1/4"	30mm
40 x 6		23G	0,6mm	1 1/2"	40mm
6 x 5,5	Cor Padrão - Púrpura	24G	0,55mm	15/64"	6mm
8 x 5,5		24G	0,55mm	5/16"	8mm
10 x 5,5		24G	0,55mm	13/32"	10mm
13 x 5,5		24G	0,55mm	1/2"	13mm
16 x 5,5		24G	0,55mm	5/8"	16mm
20 x 5,5		24G	0,55mm	3/4"	20mm
25 x 5,5		24G	0,55mm	1"	25mm
30 x 5,5		24G	0,55mm	1 1/4"	30mm
40 x 5,5		24G	0,55mm	1 1/2"	40mm
6 x 5		25G	0,5mm	15/64"	6mm
8 x 5	Cor Padrão - Laranja	25G	0,5mm	5/16"	8mm
10 x 5		25G	0,5mm	13/32"	10mm
13 x 5		25G	0,5mm	1/2"	13mm
16 x 5		25G	0,5mm	5/8"	16mm
20 x 5		25G	0,5mm	3/4"	20mm
25 x 5		25G	0,5mm	1"	25mm
30 x 5	Cor Padrão - Marrom	25G	0,5mm	1 1/4"	30mm
40 x 5		25G	0,5mm	1 1/2"	40mm
6 x 4,5		26G	0,45mm	15/64"	6mm
8 x 4,5		26G	0,45mm	5/16"	8mm
10 x 4,5		26G	0,45mm	13/32"	10mm
13 x 4,5		26G	0,45mm	1/2"	13mm
16 x 4,5	Cor Padrão - Cinza	26G	0,45mm	5/8"	16mm
20 x 4,5		26G	0,45mm	3/4"	20mm
25 x 4,5		26G	0,45mm	1"	25mm
30 x 4,5		26G	0,45mm	1 1/4"	30mm
40 x 4,5		26G	0,45mm	1 1/2"	40mm
6 x 4		27G	0,40mm	15/64"	6mm
8 x 4	Cor Padrão - Branco	27G	0,40mm	5/16"	8mm
10 x 4		27G	0,40mm	13/32"	10mm
13 x 4		27G	0,40mm	1/2"	13mm
16 x 4		27G	0,40mm	5/8"	16mm
20 x 4		27G	0,40mm	3/4"	20mm
25 x 4		27G	0,40mm	1"	25mm
30 x 4	Cor Padrão - Azul Claro	27G	0,40mm	1 1/4"	30mm
40 x 4		27G	0,40mm	1 1/2"	40mm
6 x 3,6		28G	0,36mm	15/64"	6mm
8 x 3,6		28G	0,36mm	5/16"	8mm
10 x 3,6		28G	0,36mm	13/32"	10mm
13 x 3,6		28G	0,36mm	1/2"	13mm
16 x 3,6	Cor Padrão - Vermelho	28G	0,36mm	5/8"	16mm
20 x 3,6		28G	0,36mm	3/4"	20mm
25 x 3,6		28G	0,36mm	1"	25mm
6 x 3,3		29G	0,33mm	15/64"	6mm
8 x 3,3		29G	0,33mm	5/16"	8mm
10 x 3,3		29G	0,33mm	13/32"	10mm
13 x 3,3		29G	0,33mm	1/2"	13mm
16 x 3,3		29G	0,33mm	5/8"	16mm
20 x 3,3		29G	0,33mm	3/4"	20mm
25 x 3,3		29G	0,33mm	1"	25mm

Instruções de Uso

- 1 Seleccione a agulha de acordo com o tipo de aplicação de injeção (ID, SC, EV ou IM) e características do paciente, verifique se a embalagem está íntegra e se a data de validade está vigente;
- 2 Utilizando técnica asséptica, abra a embalagem, conecte o canhão da agulha no bico da seringa, gire 180° até rosquear e travar a agulha na seringa;
- 3 Sem retirar a tampa transparente da agulha, posicione o dispositivo de segurança para trás, paralelo à seringa, de modo que não atrapalhe a visualização durante o procedimento;
- 4 Retire a tampa transparente da agulha, e proceda a aplicação da injeção;
Ao término da aplicação, retire a seringa, e acione imediatamente o dispositivo de segurança,
- 5 empurrando-o através da superfície dura de uma mesa ou aparador, ou empurrando-o com o polegar;
- 6 Confirme o travamento da agulha no dispositivo de segurança através do “click” audível;
- 7 Descarte a agulha em recipiente adequado, conforme protocolo institucional.

Validade

3 anos à partir da data de fabricação

Conservação, Armazenamento e Transporte

Armazenar em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem grandes variações na temperatura ambiente, sem a presença de gases corrosivos, afastado da luz solar.

Advertência/Precaução

- * Não deve ser utilizado se a embalagem estiver danificada, rompida ou úmida.
- * Manipular utilizando técnica asséptica.
- * Certificar-se sempre do acionamento completo do dispositivo de segurança antes do descarte.
- * Nunca manipular ou tentar destravar o dispositivo de segurança depois de ativado.
- * Descartar logo após o uso, em recipiente adequado, conforme protocolo institucional.

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: Yangzhou Medline Industry Co., Ltd - China

Responsável Técnico: Simone M. M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.
Maiores informações requisiite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br