

Produto

Lanceta com Sistema de Segurança

Cadastro / Registro M.S.

81840549006

Indicação de Uso

A Lanceta com Sistema de Segurança é utilizada para puncionar manualmente a pele de um paciente para obter um pequenas amostras capilar de sangue.

Modelos cadastrados

Modelo	especificação	Profundidade
XL II -2122	21G(0.8mm)	2.2mm
XL II -2118	21G(0.8mm)	1.8mm
XL II -2318	23G(0.6mm)	1.8mm
XL II -2618	26G(0.45mm)	1.8mm
XL II -2818	28G(0.36mm)	1.8mm
XL II -3018	30G(0.3mm)	1.8mm
XL I-0118	Lâmina (0.1mm)	1.8mm
XL I-0223	Lâmina (0.2mm)	2.3mm
XL II-1516	Lâmina (1.5mm)	1.6mm
XL II-1520	Lâmina (1.5mm)	2.0mm

Instruções de Uso

- 1 Gire a tampa de proteção da lanceta de segurança, menos de meia rodada;
- 2 Retire a tampa de proteção;
- 3 Coloque o dispositivo no local da punção e pressione para o disparo, a mola retrocede assim que finalizado e a ponta da agulha volta para a cobertura de segurança. A agulha fica travada após o disparo, não podendo ser disparada novamente, assegurando que a lanceta de segurança não possa ser utilizada;
- 4 Descarte a lanceta em um recipiente de objetos perfurocortantes;
- 5 Pressione levemente o dedo em direção ao local da punção para obter uma amostra de sangue adequada.



Rua Mario Passos Costa, 378 - Campo Grande
Cariacica/ES CEP: 29146-430

www.bramedhospitalar.com.br
contato@bramedhospitalar.com.br

(27) 3070-6870

Validade

5 anos à partir da data de fabricação

Conservação, Armazenamento e Transporte

O produto deve ser armazenado em local limpo, seco, com excelente ventilação, sem presença de gases corrosivos, afastado da luz solar, em Temperatura de -10°C a 50°C.

Advertência/Precaução

- * Dispositivo médico de uso único;
- * Cada lanceta deve ser verificada antes do uso pelo operador, não utilizar em caso a tampa estéril estiver solta ou frouxa;
- * PROIBIDO REUTILIZAR.
- * PROIBIDO REPROCESSAR;
- * Produto estéril, atóxico e apirogênico.

Importado e Distribuído

BRAMED comércio hospitalar do Brasil Ltda

Rua Mário Passos Costa, 378, Campo Grande, Cariacica - ES - CEP 29146-040 - CNPJ 28.345.933/0001-30

Fabricado por: HEBEI XINLE SCI & TECH CO.,LTD.

Responsável Técnico: Simone M. M. Garcia - Coren-ES 82157

Versão resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Maiores informações requirite pelo email produto@bramedhospitalar.com.br